



## ***Tellus 5 – Kommunikation und mehr mit Mind Express 4***

Der Tellus 5 ist ein leistungsfähiges Kommunikationsgerät, welches auch Schwerstbehinderten ermöglicht, mit Anderen zu kommunizieren. Dabei können diese sich über Mind Express direkt mit anwesenden Personen über lautstarke Lautsprecher unterhalten oder Anwendungen für E-Mail, SMS, Umfeldfeldsteuerung u.v.a. nutzen.

Der Nutzer schreibt über optimierte Tastaturlayouts entsprechend seinen Bedienmöglichkeiten. Eine lernfähige Wort- und Satzvorhersage in Kombination mit Feldern für häufige Sachverhalte ermöglicht, Anliegen schnell zu äußern.

Der lichtstarke hintergrundbeleuchtete Bildschirm hat eine Diagonale von 33,8 cm und einen kapazitiven Touchscreen.

Der am Gerät montierte Tischaufsteller erlaubt eine gute Bedienung für Nutzer, die die Felder ohne Probleme mit dem Finger direkt auswählen können.



Bei motorischen Behinderungen können als Option Fingerführungsgitter geliefert werden. Alternativ kann der Tellus 5 mit diversem Mausersatz einschließlich Augensteuerung oder mit ein bis zwei Einzelschaltern mit verschiedenen Scannmethoden bedient werden.

Das Betriebssystem Windows 7.0 pro und die integrierte WLAN-Technologie gestatten dem Nutzer alle modernen Kommunikationskanäle zu nutzen. Das integrierte Bluetooth erlaubt die Kopplung mit einem Bluetooth-Telefon und damit das Versenden von SMS oder eine störungsfreie Telefonverbindung. Mittels der frontseitigen Kamera kann der Nutzer das Gerät über eine optionale Headmaussoftware bedienen oder diese bei Skype zur Kommunikation mit seinen Angehörigen nutzen.

Neben der lernfähigen Wortvorhersage, mit der schnell Aussagen und Sätze gebildet werden können, steht eine Satzvorhersage zur Verfügung, aus der der Nutzer seine individuell abgelegten Standardsätze wählen kann. Wird zum Bsp. nur das Wort Bett eingegeben, werden alle in der Satzvorhersage abgelegten Sätze angezeigt, die das Wort Bett beinhalten.

Ich möchte jetzt ins Bett.	Ich möchte nicht ins Bett.
Bitte das Bett höher stellen.	Bitte das Bett tiefer fahren.

Alternativ kann der Nutzer häufige Aussagen direkt einem Feld zuordnen, mit Mitteilungen belegen und dieses bei Bedarf direkt auswählen. Zur Veranschaulichung des Inhalts können Symbole der Symbolsammlung SymbolStix oder auch eigene Fotos genutzt werden.

Zusätzlich zur angenehmen synthetischen Stimme, lassen sich auch natürliche Sprachmitteilungen wiedergeben. Damit kann sich der Nutzer besser in Gespräche einbringen und auch emotional äußern. Eine Auswahl von Sprachaufnahmen für wichtige Alltagsaussagen (Gesprächssituationen, Grußworte, Freude, Ärger, Pflege, Befinden...) stellen wir zur Verfügung.

Der Text im Brieffenster kann unterschiedlich dargestellt werden und auf Notizseiten oder in Briefen abgespeichert werden. Damit kann der Inhalt unkompliziert wieder aufgerufen, vorgelesen oder gedruckt werden.

Durch die eingebaute Infrarotschnittstelle können benötigte Funktionen externer Geräte mit IR-Steuerung direkt durch eine Feldauswahl ausgelöst werden. Um die unterschiedlichen Geräte zu bedienen, "lernt" der Tellus die Infrarotbefehle der Original-Fernbedienungen.

Auch eine Augensteuerung kann problemlos nachgerüstet werden, wenn diese erforderlich wird, da der Tellus dafür vorbereitet ist. (Bsp. Abb.unten)



### Lieferumfang und Daten:

- ultraheller Touchscreen mit 34-cm (13,3")-Bildschirmdiagonale,
- Li-Ion Akku 62 Wh,
- IR-Modul zur Umfeldsteuerung,
- Windows 7, 64 bit, Pro,
- WLAN-Modul, Bluetooth, UMTS,
- WebCam, Mikrofon,
- Anschlüsse: 3x USB 2.0,
- 2 Direktanschlüsse für Schalter für Scanning und/oder Einschalten,
- Abmessungen: 335 mm x 260 mm x 60 mm,
- Gewicht: ca. 2,5 kg,
- Betreuertastatur und -maus,
- Netzteil, Bedienhandbuch.



### Optional:

- Eingabehilfen, wie Kopfmaus oder Augensteuerung,
- weitere Symbolsammlungen,
- Halterungen für Bettbeistelltisch oder Rollstuhl,
- Bodenstativ.